

UTILISATION



1. FIXEZ LA BOUCLE DE CHEVILLE



- Dérouler la sangle de cheville et l'appliquer avec l'embout latéralement vers le haut pour recevoir le tube de l'attelle.
- Fixer la sangle avec le Velcro.



NOTE: la sangle de cheville peut s'appliquer au-dessus du tibia dans un cadre d'une blessure plus grave sur la partie inférieure de la jambe.

2. ATTACHER LA SANGLE A L'AINE



- Passez la boucle mâle et la sangle derrière la cuisse
- Passez la boucle femelle par-dessus la cuisse.
- fermez et serrez

3. APPLIQUER UNE TRACTION GROSSIERE



- Insérez pôle distal dans le capuchon de bride à la cheville



- Etendre pôle distal après la libération de la pince de fixation distale (VIS NOIRE)



- fermez et serrez SANS FORCER (VIS NOIRE)

4. APPLIQUER UNE TRACTION COMPLETE



- Desserrer la pince du pôle proximal. (VIS ROUGE)
- Tirer sur le cordon afin d'appliquer la traction souhaitée.
- Fermer la pince de fixation proximale. SANS FORCER (VIS ROUGE)

5. REEVALUER ET SURVEILLER



- Réévaluer la CMS et le niveau de la douleur
- Ajustez la traction pour minimiser la douleur.
- Pour assurer la stabilité joindre les deux jambes avec la grande sangle et envelopper en passant en-dessous du genou

UTILISATION PEDIATRIQUE



Pour les patients de moins de 1,10 m et / ou de 3 ans, prolonger la sangle dans l'aîne permettant ainsi à l'attelle de s'appuyer plus à proximité de la hanche.

Avant l'application toujours évaluer la CMS (circulation, motricité et sensation) en fonction du niveau de douleur et selon le protocole local.

PROBLEMES POSSIBLES :

QUAND LA PINCE DE BLOCAGE N'EST PAS ASSEZ SERREE, LA TRACTION EST PERDUE.



Ouvrez la pince de blocage. Tenez-la et vissez sur l'arrière de la pince avec votre pouce ou un tournevis et tournez la pince de blocage dans le sens horaire d'un ou deux tours. Ne pas trop serrer. Réajuster, fermer la pince et vérifier la traction.

QUAND LA PINCE DE BLOCAGE SORT DES ENCOCHES



Dans le cas où la pince sort des encoches il faut, tout simplement l'ouvrir et pousser la pince en arrière sur l'extrémité de l'encoche et la fermer.

NOTE: Toujours ranger l'attelle STS avec des pinces de blocage en position fermées. Si elles restent ouvertes, les vis peuvent se desserrer en raison des vibrations dues au transport.